

ACQ426 / 250 ml Actiomedic Ph Nötralize Solüsyon

Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize etmek için kullanılır. PH Nötr (ACQ426) ile gözü yıkadıktan sonra medikal destek alana kadar Steril Sodyum Klorid Solüsyonu (ACQ425) ile durulanması önerilir.




● Teknik Özellikler

İçerik	Actiomedic Ph Nötralize Solüsyon
Renk	Renksiz, şeffaf, transparan
Form	Sıvı
Koku	Kokusuz
Koli Miktarı	10 Adet

STARLINE

● KULLANIM ŞEKLİ

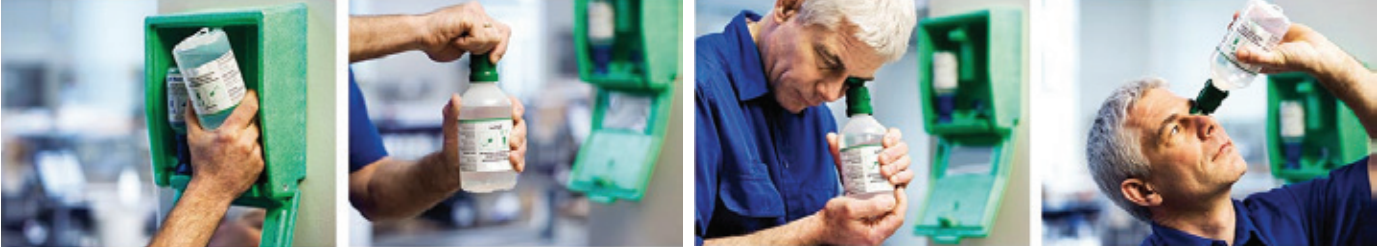

Göz duşu kapağı üzerinde bulunan ok işareti şekli yönünde çevrilir, kapak baş ve işaret parmağı ile sıkılır, göz duşu kapağı bu pozisyonda iken göz yuvasına yaslanır ve parmaklar serbest bırakılır, bu sayede göz kapakları göz duşu uygulanırken açık kalmasına yardımcı olacaktır, kafamızı yere eyerek göz duşu şişesini hafif sıkarsız ve solüsyonun gözümüzle temasını başlatırız, fazla sıvı şişe kapağındaki tahliye deliklerinden aşağı akacaktır, kalan göz solüsyonu şişe ters çevrilerek ve sıkılarak göze uygulanır, her bir göz duşu şişesi bir ilkyardıma kapsar, daha sonra tekrar kullanılmaz. Göz duşları tek kullanımlıktır.

Yüksek işlev güvenliği ergonomik göz kupası gözlerin kolayca ve hemen yıkanmasını ve aynı zamanda sıvının gözlerden tekrar atılmasını sağlar. Şişeler, tıbbi cihazlar ile ilgili geçerli kurallara uygun olarak ce işaretlidir.

Önemli! Tüm hasar türlerinde göz yıkama sıvısı göze yumuşak ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır. Şişeye sıkmadan hafifçe basın. Her zaman bir doktora başvurun ve yıkamaya nakil sırasında da devam edin.

Gerekli Uygulamalar

250ml olan göz sıvıları 5dk gibi bir süre içerisinde uygulanmaktadır. Her bir göz sıvısı tek kullanımlıktır. Tekrar tekrar kullanımı uygun değildir. Açıldıktan itibaren kullanılması mecburidir. 15 dakika sonra normal bir şekilde bol su ile durulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Saklama Şekli

Açılmamış orjinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklık aralıklarında ve kuru ortamda hasar almayacak şekilde saklayınız. Malzemenin hasar görmemesi için ürünü güneş ışığı ve UV ışınlarından koruyunuz.

● Kullanım Alanları



Tarım



İnşaat



Boya ve Matbaa



Otomotiv



Temizlik



Kimyasal Maddeler

Yabancı maddelerin dışarı atılmasında, kimyasal ve türevleri asitli-kostik-alkaliler ve cilde temas edebilecek ortamlarda kullanılmaktadır. Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır. Kimyasal içerikli sıvıların ve katı parçacıkların göze girmesi durumunda gözün yıkanması için kullanılır.

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ - GÖZ SOLÜSYONU GÖZ DUŞU

RİSKLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ

İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi almalıdır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:8/a)

İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal almalı ve işçileri durumdan haberdar etmelidir.

Korozif sıvıların doldurulduğu, boşaltıldığı ve benzeri işlemlerin yapıldığı iş yerlerinde kullanılmaya hazır akarsu bulunacak ve bir insan için yeter büyüklükte su banyoları veya süratle işleyen çok taraflı duşlar her bölümün içerisine veya yakınına kurulmuş olmalıdır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:9)

İSTASYONLAR

Grup halinde satılan iki adet göz duşu istasyon içeriklerimiz aşağıda belirtilmiştir.



CPS023 - Göz Duşu İstasyonu
(2Ad. ACQ425 + 1Ad. Ayna)

Montaj Malzemeleri
1 Ad Duvar Panosu
1 Ad Pano Üzerine Monte Ayna
1 Set Montaj Malzemesi [Dübel-Vida]



CPS024 - Göz Duşu İstasyonu
(1Ad. ACQ425 + 1Ad. ACQ426 + 1Ad. Ayna)

Sipariş Bilgisi

MODEL	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
CPS023 G.D. İstasyonu	8680907926829	1 Adet	33 x 43 x 9cm	1.80kg.
CPS024 G.D. İstasyonu	8680907926775	1 Adet	33 x 14 x 9cm	1.60kg.
ACQ425 / 500ml	8680907926744	10 Adet	14 x 33 x 28cm	6.20kg.
ACQ426 / 250ml	8680907926768	10 Adet	14 x 32 x 21cm	3.40kg.